

	Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	CLIN-FT-140
	Entretien des matelas à air pour la prévention des escarres	
Date de diffusion : Novembre 2007 Version : 2 Nombre de pages : 2	Rédigé par : Dr J. Shum - Hygiène Hospitalière Vérifié par : Dr M.R. Mallaret	

I. Objet

Décrire l'entretien des matelas, housses de matelas et accessoires des matelas à air utilisés pour la prévention des escarres afin d'éviter la transmission croisée entre patients par l'intermédiaire de ces dispositifs.

II. CHAMP d'application

Secteurs : Unité de soins, Pôle Hôtellerie Biomédical et Logistique

Domaine : Hygiène Hospitalière

III. Documents associés

- Détergent désinfectant surfaces et matériels courants ANIOSURF Fraîcheur - *CLIN-FT-013*
- Recommandations concernant l'utilisation du désinfectant hydro-alcoolique - *CLIN-FT-051*

IV. Recommandations

- La housse supérieure et les coussins gonflables doivent être entretenus selon le logigramme de la page suivante.
- La housse inférieure doit être entretenue à chaque départ de patient et au minimum une fois par mois par essuyage humide avec une lavette au détergent désinfectant complété par un spray hydro-alcoolique (pulvériser sur les coutures, rebords...)

Diffusion	Toutes les unités de soins, Pôle Hôtellerie Biomédical et Logistique	Novembre 2007
Classement	Classeur bleu "Documents Hygiène/CLIN" Dans VDoc "Hygiène/CLIN", rubrique "Entretien des dispositifs médicaux"	

Rédaction	Dr J. Shum - praticien - Hygiène hospitalière	Octobre 2007
Vérification	Dr M.R. Mallaret - praticien - Hygiène hospitalière	Octobre 2007

Historique	<i>CLIN-FT-140</i> Entretien des matelas à air pour la prévention des escarres	Octobre 2007
-------------------	--	--------------

Quand ?

- Systématiquement au départ du patient
- Une fois par mois si le patient reste plus d'1 mois

Conduite à tenir pour l'entretien des matelas de prévention d'escarres
Débrancher l'alimentation principale

Sur toute la HOUSSE supérieure du MATELAS, vérifier l'absence de :

- trous, fissures, zones d'étirement, zones fragilisées
- fuite de liquides biologiques (à l'envers de la housse)
- taches ou auréoles à l'envers de la housse

Housse intacte
= absence de trous, fuites ou taches

Housse abîmée
= présence de trous, fuites ou taches

Au départ du patient et au moins une fois/mois pour les séjours > 1 mois :

Entretien de la housse en **blanchisserie** (60°C - lessive bactéricide)

Entretien des coussins dans l'unité :

- Essuyage humide à l'aide d'un détergent désinfectant (Aniosurf)
- Désinfection par spray hydro-alcoolique.
- Laisser sécher

Elimination de la housse

Vérification de l'état

- des coussins gonflables
- du sous matelas (support des coussins)

Absence d'écoulements ou taches

Écoulement ou taches

- Essuyage humide avec un détergent désinfectant
- Désinfection par spray hydro-alcoolique
- Laisser sécher

- Essuyage humide avec un détergent désinfectant
- Laisser sécher et le placer dans un sac plastique transparent

Mettre une nouvelle housse propre

Retrait du matelas et envoi chez le fabricant pour entretien et maintenance