

Entretien des chariots douche

Rédaction : A. Brut, Conseillère ESF
S. Levet, IDE - Hygiène Hospitalière
Date : Juin 2003

Vérification :
Docteur J. Shum - Hygiène Hospitalière



1. Entretien entre chaque patient

Opération réalisée : nettoyage désinfectant du matelas, pommeau et flexible

A. Préparer matériel et produits :

- seau bleu contenant la solution de détergent-désinfectant sauf si chariot équipé d'un système de désinfection
- lavette propre

B. Nettoyer et désinfecter

- B1. Rincer le matelas à l'eau claire
- B2. Etendre la solution de détergent-désinfectant avec la lavette jusqu'à obtention de la propreté visuelle (temps de contact 15 mn) sur
 - le pommeau de douche et le flexible
 - l'intérieur du matelas
- B3. Rincer le matelas après 15 min de contact avec le détergent-désinfectant avant d'installer un autre patient

2. Entretien quotidien

Opération réalisée : Bionettoyage du matelas et de la douche
Nettoyage désinfectant des accessoires

A. Préparer matériel et produits :

- seau bleu contenant la solution de détergent-désinfectant
- lavette propre
- seau blanc contenant la solution de détergent tous usages

B. Bio-nettoyer :

- B1. Rincer, le matelas à l'eau claire
- B2. Nettoyer avec la solution de détergent tous usages les différents éléments en respectant l'ordre suivant :
 - le pommeau douche et son flexible
 - l'intérieur du matelas
 - le bac d'évacuation de l'eau s'il existe
- B3. Rincer les éléments nettoyés à l'eau claire
- B4. Tremper le pommeau de la douche 15mn dans la solution de détergent-désinfectant
- B5. Désinfecter l'intérieur du matelas, flexible et bac d'évacuation de la douche

C. Nettoyer et désinfecter

- en étendant la solution de détergent désinfectant avec la lavette sur :
- le tableau de commande mural si le système de désinfection existe
 - l'extérieur du matelas
 - le plateau, les barrières et pieds du chariot
 - le flexible d'évacuation de l'eau

D. Rincer le matelas (après 15 min de contact) avant d'installer le patient

Entretien des chariots douche**3. Entretien périodique : bionettoyage et détartrage****A. Bio-nettoyer la totalité du chariot : fréquence recommandée 2 fois/mois**

- **A1. Rincer** le matelas à l'eau claire
- **A2. Nettoyer** avec la solution de **détergent** les différents éléments en respectant l'ordre suivant :
 - le pommeau douche et son flexible
 - l'intérieur et l'extérieur du matelas
 - plateau, barrières, pieds et roulettes du chariot
 - le flexible d'évacuation de l'eau s'il existe et le bac
- **A3. Rincer** les éléments nettoyés à l'eau claire
- **A4. Tremper** le pommeau de la douche 15 mn dans le seau contenant la solution de **détergent-désinfectant**
- **A5. Désinfecter** en appliquant la solution de **détergent-désinfectant** sur les éléments cités en A2 (sauf pommeau - voir A4)
- **A6. Rincer** le matelas avant d'installer un patient

B. Détartrage : fréquence recommandée 2 fois/mois à adapter au degré d'entartrage

△ Port des gants de ménage à manchettes longues, du tablier plastique à usage unique et lunettes obligatoire

- **B1. Préparer matériel et produit :**
 - Cuvette, petite brosse, lavette propre
 - Produit détartrant (voir fiche technique dilution et consignes d'utilisation)
- **B2. Procéder au détartrage**
 - **Dévisser**, si possible, la grille du pommeau de la douche
 - **Faire tremper** grille et pommeau dans la solution de détartrant jusqu'à dissolution du tartre (15 mn maximum)
 - **Décoller**, si nécessaire, le tartre avec la brosse
 - **Détartrer** les autres points entartrés en appliquant la lavette imprégnée de la solution de détartrant (15 mn maximum)
 - **Rincer** abondamment tous les éléments détartrés

C. Traçabilité : Noter la date de détartrage**4. Autres consignes spécifiques à l'unité**